



N-アッセイ

ニットーボー



LA CRP-S D-Type

体外診断用医薬品

血清又は血漿中のC反応性蛋白測定用試薬

- ▶▶ 低域から高域まで良好な同時再現性と直線性を有します。
- ▶▶ 通常の測定範囲ではプロゾーン現象は起こりません。
- ▶▶ 測定範囲 0.02 ~ 40mg/dL

【日立7180形自動分析装置にて測定】

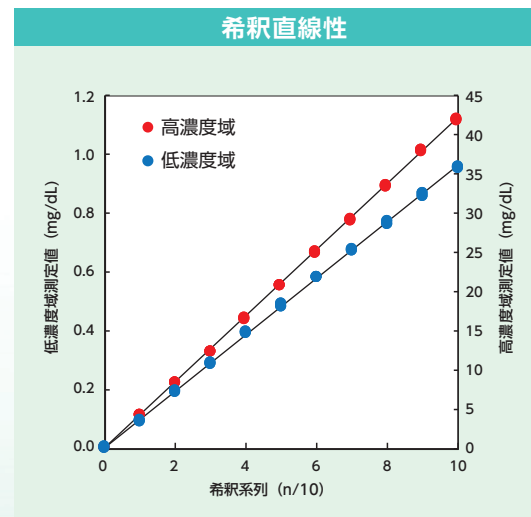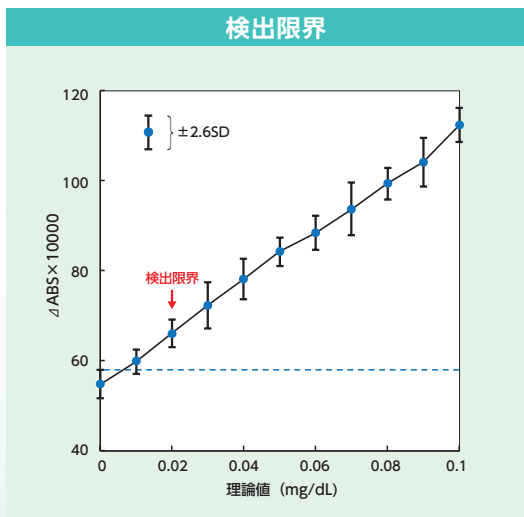

Nittobo

N-アッセイ LA CRP-S ニットーボー D-Type

【測定原理】

検体に抗ヒトC反応性蛋白質(以下、CRP)ヤギポリクローナル抗体感作ラテックス粒子を添加すると、抗原抗体反応により凝集が起こります。このとき生成した凝集塊による濁りを光学的に測定して検体中のCRP量を求めます。


〔日立7180形自動分析装置にて測定〕

同時再現性


	(mg/dL)			
	検体Ⅰ	検体Ⅱ	検体Ⅲ	検体Ⅳ
データ数	20	20	20	20
平均値	0.119	0.395	1.086	3.884
最大値	0.12	0.40	1.09	3.92
最小値	0.11	0.39	1.07	3.80
範囲	0.01	0.01	0.02	0.12
標準偏差	0.003	0.005	0.006	0.027
変動係数	2.59%	1.30%	0.55%	0.70%

相関性








〔キヤノンメディカルTBA-c16000自動分析装置にて測定〕

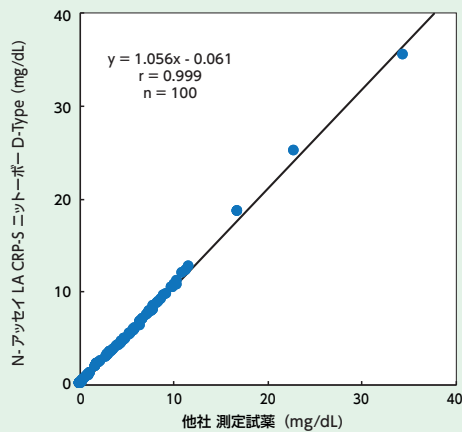

プロゾーンデータ

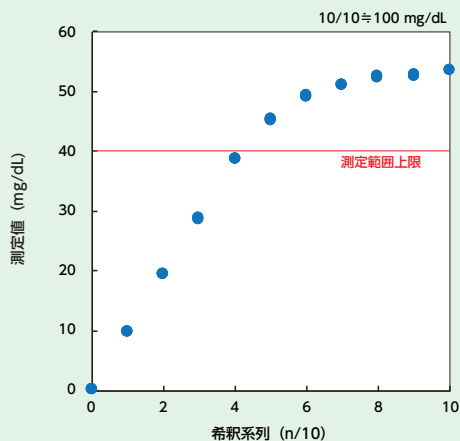

共存物質の影響

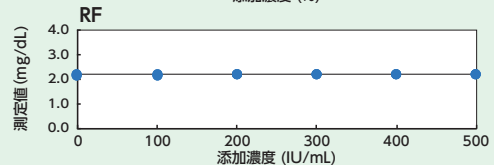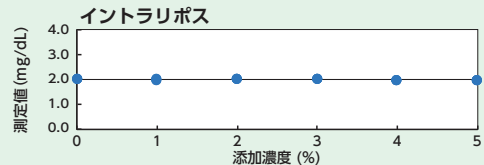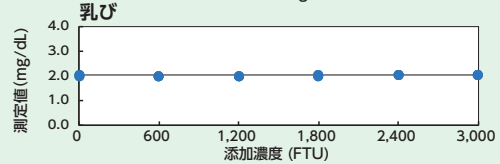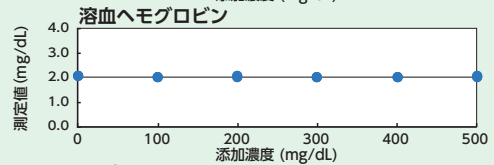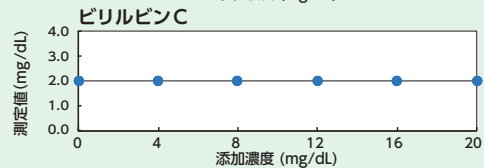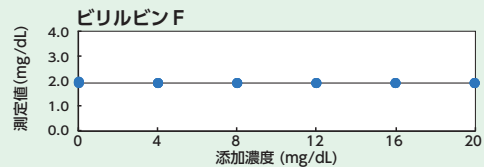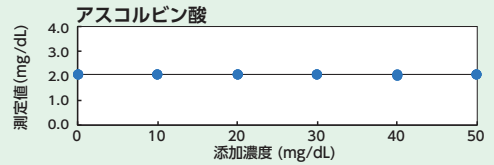

キット構成

R-1	緩衝液：Good 緩衝剤
R-2	ラテックス試液：抗ヒトC反応性蛋白ヤギポリクローナル抗体吸着ラテックス粒子

包装単位は営業担当者にお問い合わせください。

貯法・有効期間

貯法	2～10℃で保存
有効期間	製造後1年間

製造販売元： **ニットーボーメディカル株式会社**

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

問い合わせ先： ニットーボーメディカル株式会社

TEL.03-4582-5420 FAX.03-3238-4590