



N-アッセイ ニットーボー LA IgE-S

体外診断用医薬品

血清中の非特異的免疫グロブリンE測定用試薬

- ▶▶ 測定レンジの広い試薬です。
20 ~ 2,000IU/mL の範囲の IgE を正確に測定し、
安定した結果が得られます。
- ▶▶ 20,000IU/mL まで地帯現象を認めません。

〔日立7180形自動分析装置にて測定〕

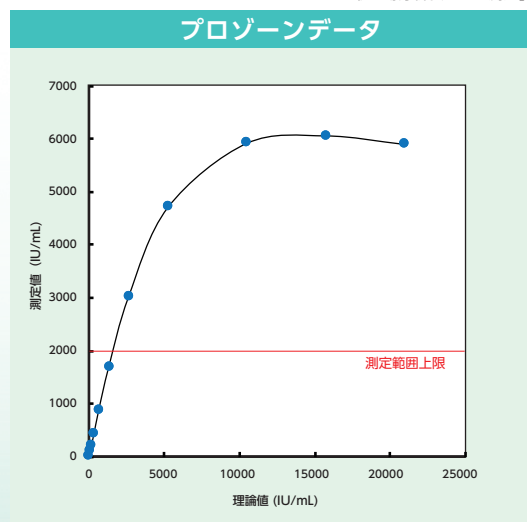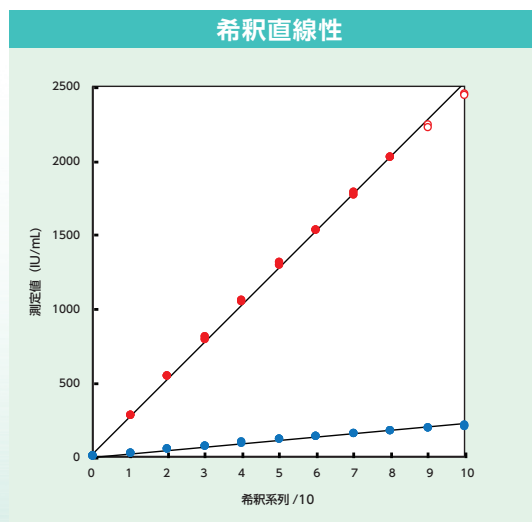

N-アッセイ LA IgE-S ニットーボー

【測定原理】






検体中の免疫グロブリンEは、抗ヒト免疫グロブリンEマウスモノクローナル抗体を感作したラテックスと反応し、凝集塊を形成します。この凝集塊を光学的に測定し、検体中の免疫グロブリンEを求めます。

〔日立7180形自動分析装置にて測定〕


同時再現性

検体 I (IU/mL)		検体 II (IU/mL)	
データ数	20	データ数	20
平均値	123.35	平均値	204.78
最大値	125.1	最大値	206.1
最小値	121.5	最小値	203.3
範囲	3.6	範囲	2.8
標準偏差	0.92	標準偏差	0.96
変動係数	0.75%	変動係数	0.47%

共存物質の影響

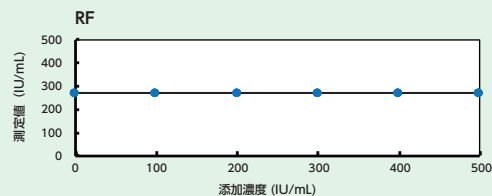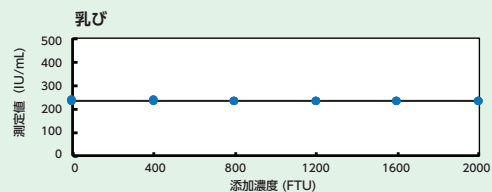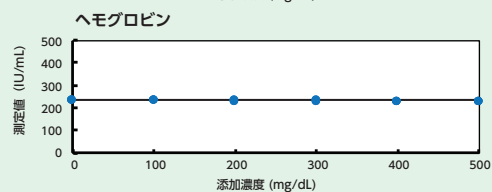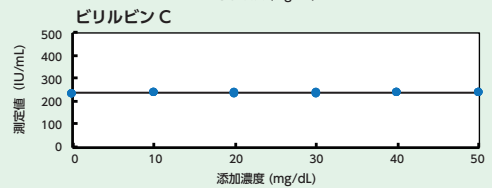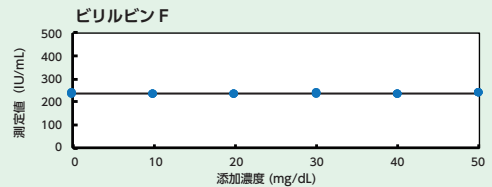

相関性

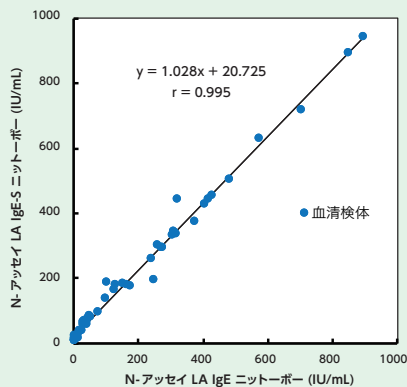

キット構成・包装単位

	キット構成	包装単位
R-1	緩衝剤	16mL×1
R-2	抗ヒト免疫グロブリンEマウスモノクローナル抗体感作ラテックス	8mL×1

貯法・有効期間

貯法	2～10℃で保存
有効期間	製造後1年間

製造販売元：**ニットーボーメディカル株式会社**

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

問い合わせ先：ニットーボーメディカル株式会社

TEL.03-4582-5420 FAX.03-3238-4590