

標準液

# マルチケムS

生化学検査用標準血清

- ▶▶ ヒト血清をベースとした多項目検量用物質です。
- ▶▶ 液状品であるため、凍結乾燥品に見られる溶解誤差がありません。
- ▶▶ 値付けの根拠が明確な検量用物質です。

## 項目

尿素窒素／クレアチニン／尿酸／グルコース／カルシウム／  
マグネシウム／無機リン／血清鉄／総蛋白／アルブミン

# マルチケムS

## 【製品内容】

本品は尿素窒素、クレアチニン、尿酸、グルコース、カルシウム、マグネシウム、無機リン、血清鉄、総蛋白、アルブミン測定試薬用標準血清です。

## 【使用方法】

- 本品を使用前日に冷蔵庫(2~10℃)に放置、又は使用当日に常温(15~25℃)に約30分放置し、融解して下さい。融解を確認後、ゆるやかに10回以上転倒混和し、血清を均一にしてからご使用下さい。
- 融解後は冷蔵(2~10℃)保存で4週間安定です。
- 凍結融解は5回まで使用可能です。再凍結の際は遮光して、-20℃以下に保管して下さい。

| 成分             | 表示値        | 基準           |
|----------------|------------|--------------|
| 尿素窒素           | 50 mg/dL   | ReCCS 基準     |
| クレアチニン         | 5.0 mg/dL  |              |
| 尿酸             | 10.0 mg/dL |              |
| グルコース          | 200 mg/dL  |              |
| カルシウム          | 10.0 mg/dL |              |
| マグネシウム         | 5.0 mg/dL  |              |
| 無機リン           | 5.0 mg/dL  |              |
| 血清鉄            | 200 µg/dL  | JCSS 基準      |
| 総蛋白            | ※          | NIST 基準      |
| アルブミン (BCP改良法) | ※          | ERM-DA470 基準 |

※表示値はロットにより異なります。

| 包装単位     |        |           |       |
|----------|--------|-----------|-------|
| 製品コード    | 製品名    | 包装単位      | 性状    |
| 92903026 | マルチケムS | 2 mL × 6本 | 凍結液状品 |

| 貯法・有効期間 |               |
|---------|---------------|
| 貯法      | 遮光、-20℃以下にて保存 |
| 有効期間    | 製造後1年間        |

\* 標準液は体外診断用医薬品に該当しません。

\* マルチケムは日東紡績株式会社の登録商標です。

製造販売元： **ニッポーメディカル株式会社**

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

問い合わせ先：ニッポーメディカル株式会社

TEL.03-4582-5420 FAX.03-3238-4590